


ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΓΟΥΣ ΤΟΥ

Algofren®

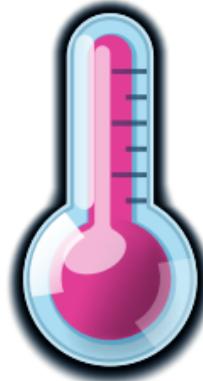

FEVER TRAP®

TEMPERATURE MONITOR



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



Θερμόμετρο συνεχούς
παρακολούθησης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τι περιέχει η συσκευασία	1
Περιγραφή Προϊόντος	2
Προοριζόμενη χρήση & Προφυλάξεις	3
Οδηγίες Χρήσης	4
Έκταση Εύρους Παρακολούθησης	10
Εύρος Φυσιολογικών Τιμών Θερμοκρασίας Σώματος	11
Φόρτιση, Αποθήκευση & Συντήρηση	12
Επίλυση Προβλημάτων	13
Τεχνικές Προδιαγραφές	14
Πιστοποίηση & Αποποίηση Ευθύνης	15
Πίνακες Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (ΗΜΣ)	17
Ορισμός Συμβόλων	21

1

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



1

Fever Trap® Patch
x1



2

Φορτιστής
x1



3

Αυτοκόλλητες Ταινίες
στερέωσης μιας χρήσης
x8

4

Μπαταρία AAA
x3

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



To **Fever Trap® patch** τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου.
Για σωστή απόρριψη της μπαταρίας,
παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες στη σελίδα 16.

To Fever Trap®



Φορτιστής

3

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Το ασύρματο θερμόμετρο συνεχούς παρακολούθησης **Fever Trap®** είναι μια μη επεμβατική και επαναχρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική συσκευή οικιακής χρήσης. Το προϊόν αυτό προορίζεται για μη επείγουσα περιπατητική και συνεχή παρακολούθηση της μασχαλιάς θερμοκρασίας του σώματος για ηλικίες από 29 ημερών και άνω.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- ① Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή τροποποίησης αυτής της συσκευής.
- ② Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μαζί με εξοπλισμό μαγνητικής τομογραφίας ή CT.
- ③ Οι γιατροί θα πρέπει να διαγνώσουν με βάση τις κλινικές αναφορές και συμπτώματα και να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή ως βοηθητικό εργαλείο.
- ④ Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν δεν μπορεί να παραμείνει σε συνεχή επαφή με το δέρμα και μην την χρησιμοποιείτε σε τραυματισμένο ή ερεθισμένο δέρμα.
- ⑤ Η συσκευή αυτή δεν είναι αποστειρωμένη.
- ⑥ Συνιστάται μόνο για εσωτερική χρήση.
- ⑦ Το **Fever Trap® patch** πρέπει να φορεθεί κάτω από τη μασχάλη. Η έκθεσή του στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει ανακριβείς μετρήσεις.
- ⑧ Μη βυθίζετε το **Fever Trap® patch** στο νερό. Το patch μπορεί να αφαιρεθεί πριν από το μπάνιο ή το ντους και να επανεφαρμοστεί μετά.
- ⑨ Μην κάμπτετε ή στρέψετε υπερβολικά το **Fever Trap® patch**.
- ⑩ Για να ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης πυρετού, το smartphone δεν θα πρέπει να βρίσκεται στη λειτουργία σίγασης κατά τη διάρκεια χρήσης του **Fever Trap®**.

- ⑪ Σε περίπτωση δερματικής αντίδρασης, αφαιρέστε αμέσως το **Fever Trap® patch**.
- ⑫ Για πρόσθετη ασφάλεια, φυλάξτε το προϊόν μακριά από το στόμα του χρήστη.
- ⑬ Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει μόνο τις μπαταρίες AAA του φορτιστή. Δεν παρέχεται κανένα μέρος που να επισκευάζεται από τον χρήστη γι' αυτό το προϊόν.
- ⑭ Η εγκατάσταση της συσκευής πραγματοποιείται από ενηλίκους. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της συσκευής.
- ⑯ Η απόδοση της συσκευής μπορεί να μειωθεί εάν παρουσιαστούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
 - α) λειτουργία εκτός του καθορισμένου από τον κατασκευαστή εύρους θερμοκρασίας και υγρασίας, β) αποθήκευση εκτός του καθορισμένου από τον κατασκευαστή εύρους θερμοκρασίας και υγρασίας, γ) μηχανικό σοκ (για παράδειγμα, ρίψη), δ) θερμοκρασία του ασθενούς κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εγκατάσταση της εφαρμογής



1.1.
Πραγματοποιήστε
λήψη της
εφαρμογής,
πραγματοποιώντας
αναζήτηση "Fever
Trap®" στο
application store.



1.2.
Δημιουργήστε
έναν λογαριασμό
και ένα προφίλ για
τον χρήστη που
εφαρμόζει επάνω
του το Fever
Trap® patch.





1.3.
Ορίστε μια
ειδοποίηση
θερμοκρασίας για
το επιλεγμένο
προφίλ χρήστη.

2. Ενεργοποίηση του patch

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Πρέπει να τοποθετήσετε το Fever Trap® patch
στον φορτιστή για να το ενεργοποιήσετε

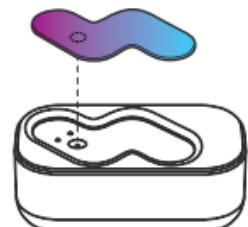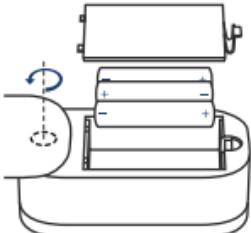

2.1. Περιστρέψτε το καπάκι
για να αποκτήσετε πρόσβαση
στον χώρο των μπαταριών.
Τοποθετήστε τρεις
μπαταρίες AAA στον
φορτιστή και αφήστε το Fever
Trap® patch να φορτιστεί για
τουλάχιστον δύο ώρες.

2.2. Αφού φορτίσετε
το Fever Trap® patch,
αφαιρέστε το από τη
φόρτιση. Το patch δεν
συγχρονίζεται με το
τηλέφωνο όταν
βρίσκεται σε φόρτιση.

5

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

3. Αντιστοιχίστε το patch



3.1 Πριν αντιστοιχίσετε το **Fever Trap® patch**, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη.

3.2 Τοποθετήστε το **Fever Trap® patch** στο τηλέφωνο και επιλέξτε "Εναρξη αντιστοιχίσης".

3.3 Αφού γίνει η αντιστοιχίση του **Fever Trap® patch**, βεβαιωθείτε ότι ο σειριακός αριθμός στην οθόνη, ταιριάζει με αυτόν στο πίσω μέρος του patch.


6

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


4. Προσαρμόστε το patch



4.1 Αφαιρέστε προσεκτικά την πλευρά 1 από την αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης.

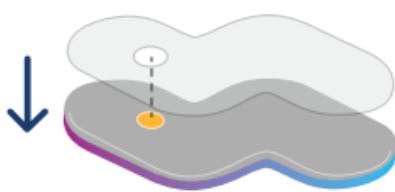

4.2 Ευθυγραμμίστε τον μεταλλικό αισθητήρα θερμοκρασίας του **Fever Trap®** με την τρύπα στην αυτοκόλλητη ταινία.

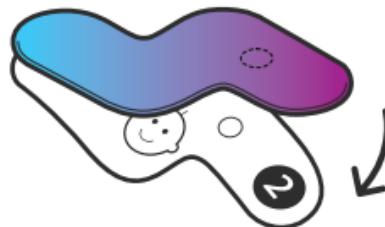


4.3 Προσαρμόστε το **Fever Trap®** patch στην ταινία στερέωσης. Πιέστε σταθερά την αυτοκόλλητη ταινία για να διασφαλίσετε την εφαρμογή. Αφαιρέστε προσεκτικά την πλευρά 2 από την αυτοκόλλητη ταινία.


7

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

5. Προετοιμασία

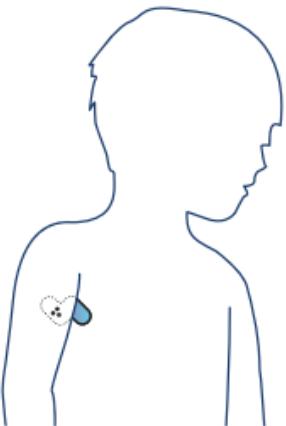

5.1 Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή της μασχάλης είναι καθαρή και στεγνή. Τοποθετήστε το **Fever Trap® patch** στο σώμα κάτω από τον βραχίονα, έτσι ώστε ο μεταλλικός αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας (μωβ πλευρά) να είναι πιο κοντά στη μασχάλη.

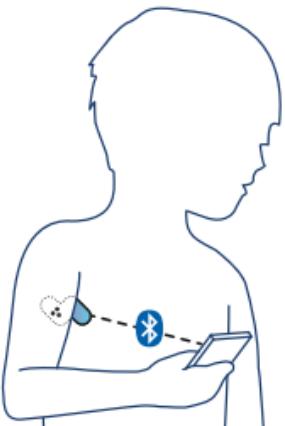

5.2 Αφήστε το χέρι να πέσει φυσικά στο πλάι σας, για να καλύψει το **Fever Trap® patch** και κρατήστε το εκεί για τουλάχιστον 8 λεπτά. Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας σε πολύ κοντινή απόσταση.

ΕΙΣΤΕ
ΕΤΟΙΜΟΙ!



8

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ένδειξη χρώματος θερμοκρασίας

Λιγότερο από ή ίσο με 37°C (98.6°F).

Μεταξύ 37°C (98.6°F) και της καθορισμένης ειδοποίησης (alert).

Μεγαλύτερη από ή ίση με την καθορισμένη ειδοποίηση (alert).

Παρακολούθηση θερμοκρασίας

- 1 Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth®.
 - Σημείωση: Εάν χαθεί η σύνδεση Bluetooth®, οι μετρήσεις θερμοκρασίας δεν θα καταγραφούν.
- 2 Επιλέξτε το προφίλ του χρήστη που θα παρακολουθήσετε.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι εντός της εμβέλειας του φορτιστή για συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας.
- 4 Όταν τελειώσετε τη μέτρηση, απλά πιέστε "Πατήστε για να σταματήσετε", κλείστε την εφαρμογή και τοποθετήστε το Fever Trap® patch πίσω στον φορτιστή.
 - Παρακολουθήστε τη θερμοκρασία μέσω της αρχικής οθόνης της εφαρμογής, του ημερολογίου και της γραφικής απεικόνισης.
 - Επιλέξτε τη λειτουργία σημειώσεων από την αρχική οθόνη για να προσθέσετε συμπτώματα και φάρμακα. Οι σημειώσεις θα αποθηκευτούν στη γραμμή μενού.

Σημείωση: To Fever Trap® μετρά μόνο τη μασχαλιά θερμοκρασία (μασχάλης).

9

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ




ΑΡΧΙΚΗ ΘΟΟΝΗ

Δείτε την τρέχουσα θερμοκρασία. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του Fever Trap® patch εμφανίζεται κάτω από τη θερμοκρασία.



ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Περιστρέψτε το τηλέφωνό σας (smartphone) σε οριζόντια προβολή για να παρατηρήσετε το γράφημα.

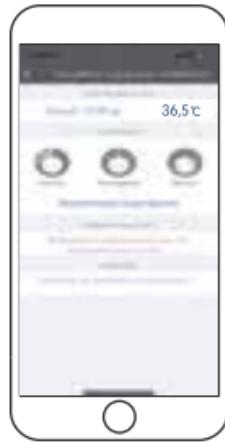

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΩΝ

Κρατήστε λεπτομερείς σημειώσεις των συμπτωμάτων και των φαρμάκων.




ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗΜΕΙΩΣΩΝ

Προβάλλετε και μοιραστείτε τις σημειώσεις σας με τα μέλη της οικογένειάς σας.

10

ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΡΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

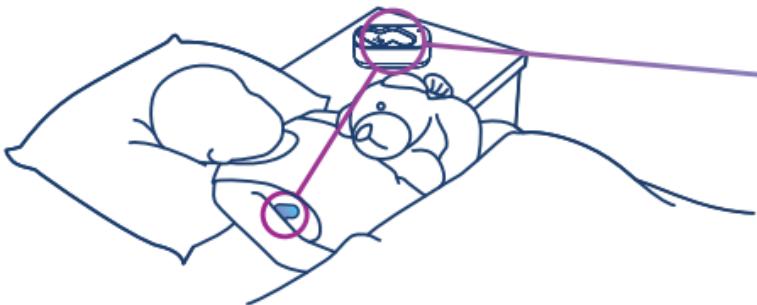

1. Τοποθετήστε τον φορτιστή πολύ κοντά στον χρήστη που φορά το **Fever Trap® patch** (σε απόσταση 1,5 m / 4.9 ft).

Σημείωση: Κάθε **Fever Trap® patch** πρέπει να χρησιμοποιείται με τον φορτιστή που συνοδεύεται στην αρχική συσκευασία για να στέλνει την καταγραφή θερμοκρασίας στο τηλέφωνό σας.

Βεβαιωθείτε ότι οι σειριακοί αριθμοί στο **Fever Trap® patch** και τον φορτιστή ταιριάζουν.



2. Ο φορτιστής θα στείλει την καταγραφή θερμοκρασίας στο τηλέφωνό σας (έως 40 m / 131 ft*), επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία χωρίς να χρειάζεται να βρίσκεστε κοντά στον χρήστη που φοράει το **Fever Trap® patch**.

*Χωρίς να παρεμβάλλονται τυχόν εμπόδια

ΕΥΡΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Εύρος ηλικίας	Μασχαλιαίας (μασχάλη)	Στοματικής	Αυτιού	Πρωκτικής
0-2 ετών	34,7 °C - 37,3 °C (94.5 °F - 99.1 °F)	N/A	36,4 °C - 38,0 °C (97.5 °F - 100.4 °F)	36,6 °C - 38,0 °C (97.9 °F - 100.4 °F)
3-10 ετών	35,9 °C - 36,7 °C (96.6 °F - 98.0 °F)	35,5 °C - 37,5 °C (95.9 °F - 99.5 °F)	36,4 °C - 37,8 °C (97.5 °F - 100.0 °F)	36,6 °C - 38,0 °C (97.9 °F - 100.4 °F)
11-65 ετών	35,2 °C - 36,9 °C (95.3 °F - 98.4 °F)	36,4 °C - 37,6 °C (97.6 °F - 99.6 °F)	35,9 °C - 37,6 °C (96.6 °F - 99.7 °F)	37,0 °C - 38,1 °C (98.6 °F - 100.6 °F)
>65 ετών	35,6 °C - 36,3 °C (96.0 °F - 97.4 °F)	35,8 °C - 36,9 °C (96.4 °F - 98.5 °F)	35,8 °C - 37,5 °C (96.4 °F - 99.5 °F)	36,2 °C - 37,3 °C (97.1 °F - 99.2 °F)

Σημείωση: Το Fever Trap® μετρά μόνο τη μασχαλιαία θερμοκρασία (μασχάλης).

Πηγή: www.medguidance.com

Φόρτιση, Αποθήκευση & Συντήρηση



Αποθήκευση patch & φόρτιση

Συνιστάται να αποθηκεύετε το Fever Trap® patch στη βάση φόρτισης όταν δεν το χρησιμοποιείτε για να το διατηρείτε φορτισμένο. Όταν εξαντληθούν οι μπαταρίες AAA του φορτιστή, αντικαταστήστε άμεσα με ίδιου τύπου.

Αυτοκόλλητες ταινίες στερέωσης μιας χρήσης

Κάθε Fever Trap® διαθέτει 8 ιατρικές αυτοκόλλητες ταινίες στερέωσης μιας χρήσης. Οι αυτοκόλλητες ταινίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και 24 ώρες, αλλά ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να επιθυμούν συχνότερη αλλαγή των ταινιών ανάλογα με τον τύπο του δέρματός τους και την άνεσή τους. Επιπρόσθετες αυτοκόλλητες ταινίες μπορούν να αγοραστούν χωριστά ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Λυχνίες Φόρτισης

-  Η λυχνία LED ανάβει για τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα – Οι μπαταρίες AAA είναι λειτουργικές για τη φόρτιση.
-  Η λυχνία LED αναβοσβήνει σε συχνότητα 2 δευτερολέπτων – Βρίσκεται σε διαδικασία φόρτισης.
-  Η λυχνία LED αναβοσβήνει σε συχνότητα 5 δευτερολέπτων – Η φόρτιση είναι πλήρης.
-  Η λυχνία LED δεν ανάβει καθόλου – Οι μπαταρίες δεν είναι φορτισμένες ή ελέγχετε εαν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Καθαρισμός

Συνιστάται η χρήση καινούργιας αυτοκόλλητης ταινίας με κάθε χρήση. Για να καθαρίσετε το Fever Trap® patch πριν από την εφαρμογή νέας ταινίας, σκουπίστε και τις δύο πλευρές με αλκοολούχο διάλυμα (70% ισοπροπυλική αλκοόλη).

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Ασυνήθιστα δεδομένα Θερμοκρασίας	<p>1. Η συσκευή ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά.</p> <p>2. Η συσκευή ενδέχεται να μην έχει εφαρμοστεί σωστά.</p> <p>3. Η συσκευή εφαρμόστηκε στη μασχάλη για λιγότερο από οκτώ λεπτά.</p> <p>4. Ο βραχίονας δεν διατηρήθηκε σταθερά στη φυσική ανατομική του θέση κατά τη διάρκεια της μέτρησης.</p> <p>5. Η θερμοκρασία που μέτρησε η συσκευή είναι είτε πολύ υψηλή είτε πολύ χαμηλή.</p> <p>6. Το Fever Trap® patch εφαρμόστηκε πριν από την αντιστοίχιση (pairing).</p> <p>7. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν καλύπτεται από τον βραχίονα.</p> <p>8. Ο χρήστης άγγιξε τον αισθητήρα πριν τον εφαρμόσει.</p>	<p>1. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στο 210-6253905.</p> <p>2. Ελέγχετε ξανά τη θέση της συσκευής ή την επαφή με τη μασχάλη.</p> <p>3. Κρατήστε τη συσκευή εφαρμοσμένη για οκτώ λεπτά πριν από την ανάγνωση της θερμοκρασίας.</p> <p>4. Κρατήστε σταθερά τον βραχίονα στη φυσική ανατομική του θέση.</p> <p>5. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή κάτω από θερμοκρασίες λειτουργίας που προβλέπονται στο εγχειρίδιο χρήσης.</p> <p>6. Αντιστοίχιστε το Fever Trap® patch πριν το εφαρμόσετε.</p> <p>7. Καλύψτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας με τον βραχίονα.</p> <p>8. Μην αγγίζετε τον αισθητήρα πριν τον εφαρμόσετε.</p>
Το τηλέφωνο (smartphone) δεν μπορεί να διαβάσει δεδομένα από τη συσκευή	<p>1. Η λειτουργία Bluetooth® δεν είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο (smartphone).</p> <p>2. Βρίσκεται εκτός εύρους σύνδεσης.</p> <p>3. Η μπλε πλευρά του Fever Trap® patch εμποδίζεται από το χέρι.</p>	<p>1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® στο τηλέφωνο (smartphone).</p> <p>2. Μετακινήστε το τηλέφωνο πιο κοντά στη συσκευή.</p> <p>3. Αφήστε εκτεθειμένη την μπλε πλευρά του Fever Trap® patch και μην την πιέζετε με τον βραχίονα.</p>

14

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα προϊόντος: Fever Trap®

Κατάλογος/Μοντέλο: VV200 / VV-200

Μέγεθος: 64 mm x 41 mm

Πάχος: 5,5 mm

Βάρος: 7,3 g

Διάρκεια συνεχούς χρήσης του patch: 7 ημέρες

Διάρκεια ζωής προϊόντος: 3 χρόνια

Εγγύηση προϊόντος: 1 χρόνος

Απόσταση μετάδοσης: 40 m / 131 ft. (διά μέσου του φορτιστή και χωρίς να παρεμβάλλονται τυχόν εμπόδια)

Ακρίβεια: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ (0.2°F) μεταξύ 37°C - 39°C (98.6°F - 102.2°F).

$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (0.4°F) μεταξύ 35°C - 37°C (95°F - 98.6°F) & 39°C - 42°C (102.2°F - 107.6°F)

Βαθμός υδατοπροστασίας patch: IP25

Βαθμός υδατοπροστασίας φορτιστή: IP21

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Εύρος Θερμοκρασίας: 10°C - 40°C (50°F - 104°F)

Εύρος Υγρασίας: 15% - 85%

Εύρος Πίεσης: 70 - 106 kPa

ΔΕΚΤΗΣ:

Συσκευές Android: 4.3 ή νεότερες

Συσκευές Apple: iPhone 5s ή νεότερες και iOS 8.0 ή νεότερη έκδοση



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σημειώσεις:

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια που ισχύουν για τις ψηφιακές συσκευές Κλάσης B, σύμφωνα με το τμήμα 15 των Κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά έχουν υπολογιστεί, ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχονται εγγυήσεις ότι δε θα υπάρξουν παρεμβολές σε κάποια κτηριακή εγκατάσταση.

Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, τις οποίες μπορείτε να διαπιστώσετε απενεργοποιώντας (π.χ. τοποθετώντας το **Fever Trap® patch** στον φορτιστή) και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης καλείται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

1. Αύξηση της απόστασης μεταξύ του patch **Fever Trap®** και του φορτιστή.
2. Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
3. Συμβουλευτείτε έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το τμήμα 15 των Κανονισμών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (1) Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) Η συσκευή αυτή θα πρέπει να δέχεται όλες τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν έχει εγκριθεί ρητά από τη VivaLNK θα μπορεί να ακυρώσει την αρμοδιότητα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Για ιδιωτικά νοικοκυριά: Πληροφορίες για τη διάθεση αποβλήτων των χρηστών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)


Η διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμάτων της περιοχής σας. Για την ακατάλληλη απόρριψη αυτών των αποβλήτων μπορεί να ισχύουν κυρώσεις, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Το σύμβολο αυτό (--) επάνω στο προϊόν(τα) και/ή τα συνοδευτικά έγγραφα υποδεικνύει ότι χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΑΗΗΕ) δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίματα. Για τη διασφάλιση της σωστής διαχείρισης και ανακύκλωσης του προϊόντος παραδώστε το στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χωρίς χρέωση. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας σε τοπικό σας κατάστημα λιανικής πώλησης με την αγορά ενός ισοδύναμου νέου προϊόντος.

Αφαίρεση μπαταριών

Ο φορτιστής περιέχει μπαταρίες AAA και το Fever Trap® patch περιέχει μπαταρία λιθίου. Ανατρέξτε στις κατάλληλες οδηγίες απόρριψης παρακάτω:

1. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, κόψτε το Fever Trap® patch. Η μπαταρία βρίσκεται στο κέντρο του patch.

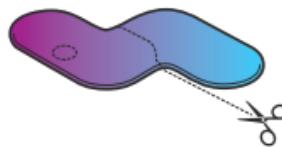

2. Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες AAA, ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας στο κάτω μέρος του φορτιστή.

3. Όλες οι μπαταρίες/συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίματα μέσω των κατάλληλων σημείων συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.

Η διασφάλιση της σωστής απόρριψης των παλαιών σας μπαταριών / συσσωρευτών συμβάλλει στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον, τα ζώα και την ανθρώπινη υγεία.

4. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των παλαιών μπαταριών / συσσωρευτών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμάτων.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΗΜΣ)

Πίνακας 1

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ

Δοκιμή ατρωσίας	Επίπεδο δοκιμής IEC 60601	Επίπεδο συμμόρφωσης	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Καθοδήγηση
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) IEC 61000-4-2	Επαφή +/- 6 kV Αέρας +/- 8 kV	Ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) IEC 61000-4-2	Το δάπεδο πρέπει να είναι από ξύλο, μπετόν ή κεραμικά πλακίδια. Εάν τα δάπεδα έχουν επιστρωθεί με συνθετικά υλικά, τότε η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%.
Μαγνητικό πεδίο συχνότητας ρεύματος (50/60 Hz) IEC 61000-4-6	3 A/m		Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ρεύματος θα πρέπει να μετρούνται στην προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης για να βεβαιώνεται ότι είναι επαρκώς χαμηλά.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΗΜΣ)

Πίνακας 2 (Μέρος 1)

Δοκιμή ατρωσίας	Επίπεδο δοκιμής IEC 60601	Επίπεδο συμμόρφωσης	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Καθοδήγηση
Ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες (RF) IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz	3 V/m	<p>Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη από τη συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού, από οποιοδήποτε τμήμα του Fever Trap®, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων του. Η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού υπολογίζεται βάσει της εξίσωσης που αφορά τη συχνότητα του πομπού.</p> <p>Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού.</p> <p>$d = 1,2 \sqrt{P}$</p> <p>$d = 1,2 \sqrt{P} \text{ 80 MHz to 800 MHz}$</p> <p>$d = 2,3 \sqrt{P} \text{ 800 MHz to 2.5 GHz}$</p> <p>(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)</p>

ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΗΜΣ)

Πίνακας 2 (Μέρος 2)

Δοκιμή ατρωσίας	Επίπεδο δοκιμής IEC 60601	Επίπεδο συμμόρφωσης	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Καθοδήγηση
Ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες (RF) IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz	3 V/m	<p>Όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική τιμή ισχύος εξόδου του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού και d είναι η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m).</p> <p>Οι τιμές ισχύος πεδίου από σταθερούς πομπούς RF, όπως καθορίζονται από μια ηλεκτρομαγνητική μελέτη του χώρου, θα πρέπει να είναι μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε κλίμακα συχνοτήτων.</p> <p>Μπορεί να προκύψουν παρεμβολές πλησίον εξοπλισμού που φέρει ως σήμανση το σύμβολο: </p>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα 80 MHz και στα 800 MHz χρησιμοποιείται το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες ενδεχομένως να μην ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση που προέρχεται από κατασκευές, αντικείμενα και ανθρώπους.

Οι εντάσεις πεδίου από μικτούς πομπούς, όπως είναι οι σταθμοί βάσης για ραδιοτηλέφωνα (κινητά/ασύρματα) και οι κινητοί ραδιοπομποί ξηράς, οι πομποί ερασιτεχνικού ραδιοφώνου, οι πομποί ραδιοφωνικών εκπομπών στα AM και στα FM και οι πομποί τηλεοπτικών εκπομπών, δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για να αξιολογηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προκαλείται από την ύπαρξη σταθερών πομπών ραδιοσυχνοτήτων, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο πραγματοποίησης ηλεκτρομαγνητικής μελέτης του χώρου. Αν η μετρούμενη ένταση πεδίου στην τοποθεσία όπου χρησιμοποιείται το Fever Trap® υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης RF, όπως αναφέρεται παραπάνω, τότε θα πρέπει να γίνει εξέταση του Fever Trap®, για να εξακριβωθεί η κανονική του λειτουργία. Αν διαπιστωθεί μη ομαλή λειτουργία, ίσως χρειαστεί να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα, όπως η αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης του Fever Trap®.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΗΜΣ)

Πίνακας 3

Καθοδήγηση και δήλωση του κατασκευαστή - Παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου πομπού ¹ W	Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού		
	150 kHz to 80 MHz $d=1,2\sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d=1,2\sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d=2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,36	0,36	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

¹ Για τους πομπούς με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου, η οποία δεν αναφέρεται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να προσδιοριστεί από την εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε Watt (W), σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα 80 MHz και στα 800 MHz ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες ενδεχομένως να μην ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση που προέρχεται από κατασκευές, αντικείμενα και ανθρώπους.

21

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



Σήμα FCC



Σήμα AHHE



Συμβουλευτείτε
τις οδηγίες χρήσης



Εφαρμοσμένο μέρος
τύπου BF



Όριο Θερμοκρασίας



Κατασκευαστής



Ημερομηνία κατασκευής



Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα



Σειριακός αριθμός



Αριθμός παρτίδας/δεσμίδας



Αριθμός καταλόγου



Σήμανση CE και αριθμός
κοινοποίησης φορέα



Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο
– μόνο το διάφανο κάλυμμα



Ασύρματη αναμετάδοση




Διατηρήστε στεγνό



ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ

Algofren®

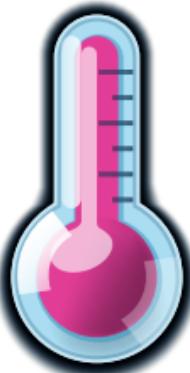

**FEVER
TRAP®**
TEMPERATURE MONITOR



40°C
10°C / 50°F
104°F

LBL 75-06-81 Rev AA



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague,
The Netherlands

www.fevertrap.com

Κατασκευάζεται από τη VivaLNK Inc
51 East Campbell Ave., Suite 160, Campbell
CA95008, USA

Διανέμεται από την
INTERMED S.A. Pharmaceutical Laboratories
Καλυφτάκη 27, 145 64 Κηφισιά
Τηλ.: 210 6253905, www.intermed.com.gr